

Uniq

LADY Condom
Condón Femenino


VENTAJAS

- Él ya no tendrá que usar condón.
- Él solo ve las sexy ligas.
- Ofrece extra protección cubriendo los genitales externos.
- Es muy seguro, las ligas elásticas evitan que el condón se quede dentro de la vagina.
- Algunas mujeres han experimentado mayor estimulación debido a la burbuja y no sienten el condón.
- Lo puedes usar durante el período.


VER INSTRUCCIONES ADENTRO 

¿CÓMO USAR EL LADY CONDOM?


Compruebe que la caja esté intacta, y esté dentro de la fecha de caducidad. Tome un condón y retírelo cuidadosamente de su empaque asegurándose de no dañarlo con uñas y joyas. **Desenrolle las ligas, NO el condón.**

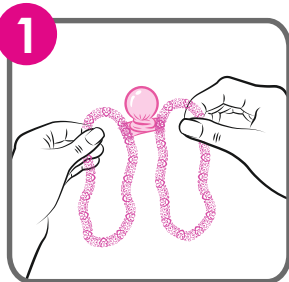


Antes de ponerse las ligas observe bien la posición de la burbuja. Ponga las ligas como si fuera un panty, **con la burbuja hacia adentro** (hacia la vagina) e inserte la burbuja como un tampón. Asegúrese que la base de condón quede extendida.

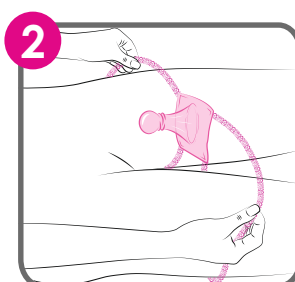

El Lady condom debe insertarse en la vagina antes de que se produzca cualquier contacto entre la vagina y el cuerpo de su pareja para así ayudar a prevenir las ITS y el embarazo.

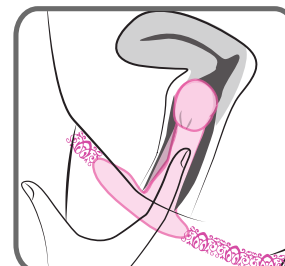

Se recomienda usar lubricante adicional en el pene de su pareja para aumentar la sensación de placer.

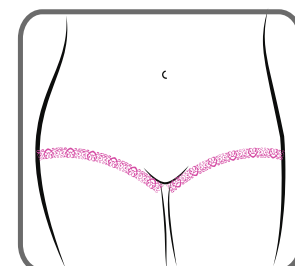


VENTA DESECHABLES
online.com

Compra tus [condones Uniq](#) en nuestra tienda online

Durante la primera penetración guíe el pene. Tenga en cuenta que debe guiar el pene cada vez que cambie de posición.



Después de la eyaculación de su pareja, asegúrese de cerrar la base del condón y retírelo de la vagina. Luego, gire la base del condón y remueva los ligeros como un panty. Asegúrese de mantener el pene y el condón usado lejos del área vaginal.

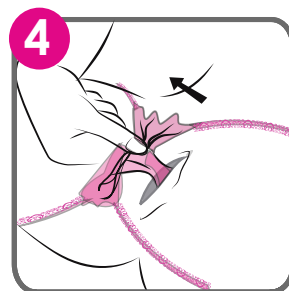

Después de usar, deseche el condón higiénicamente. Envuélvalo en un pañuelo de papel y colóquelo en la canasta de basura.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Si el condón o su empaque muestra signos visibles de daño, no los use. Deseche el condón dañado y utilice uno nuevo.
- Algunos medicamentos aplicados al pene o vagina pueden dañar el condón. Pregúntele a su médico sobre la compatibilidad entre sus medicamentos y los condones.
- Nunca se debe usar un condón dos veces. Si el condón es reutilizado, no ofrecerá la misma protección contra el embarazo o las ITS y tendrá mayores posibilidades de deslizamiento y rotura.

- Si cree que su método de anticoncepción ha fallado, póngase en contacto con su médico para obtener un consejo de anticoncepción de emergencia lo antes posible, preferiblemente dentro de las 24 horas, pero no más tarde de 72 horas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
ESCANEE EL CÓDIGO

